

Installationsvorschrift und Montagehinweise - Relex Wannenlift

Montagehinweise

Allgemein:

- bevor das Gehäuse abgenommen werden kann ist der Haltegriff incl. 8mm Bolzen zu entfernen
- Gehäuse oben vorsichtig nach vorne ziehen und nach unten aus den Haltestiften aushängen (Kabelverbindung [Stecker bzw. Wagoklemmen] für Ladebuchse trennen)
- der Interne Akku sollte während der Montage aus dem Gerät entfernt werden (Kabelbinder durchtrennen und Stecker vorsichtig von der Steuerplatine abziehen – neue Kabelbinder liegen für den Einbau bei – Einbaulage des Akkus merken und beachten!)
- die Anzahl der Befestigungsschrauben sowie die Auswahl der Dübelvariante richtet sich nach der jeweiligen Wandbeschaffenheit um eine sichere Befestigung des Gerätes zu garantieren
- der Abstand zwischen Gerät (Aufnahme für Haltestange) und Wanne ca. 0,5 cm (so das Haltestange beim Einfahren des Sitzbandes selbständig in die Aufnahme des Liftes läuft, und beim Ausfahren auch wieder in die Wanne)
- seitlich sollte der Wannenlift so ausgerichtet werden, dass das Sitzband unmittelbar nach der “Schräge” der Wanne, über den ebenen Wannenboden Laufen würde (im Einzelfall auf besondere Wannenformen Rücksicht nehmen)
- nach der Befestigung, die Schutzfolie vom Sitzband entfernen und das Band hinter der unteren Kunststoffrolle so weit durchstecken, dass die Haltestange in die Schlaufe des Sitzbandes mittig fixiert (mit Silikon einkleben) werden kann
- Bodenhalter montieren (siehe unten)
 - Akku wieder einbauen (Stecker nicht falsch herum einstecken)
 - Gehäuse anbringen - analog wie Demontage (!!!dabei Steckverbinder für Ladebuchse zusammenstecken)
 - Schutzfolie vom Gehäuse entfernen
 - nach dem Anbringen der Abdeckung ist das Gerät mittels Silikon rundherum abzudichten

Bodenhalter

- allgemeine Hinweise beachten
- Bodenhalter mittels Sitzband ausrichten und mit 3 Schrauben (8mm) befestigen
-Schraubenlänge sowie Dübelvariante richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes
- Hinweis an den Kunden zur Verwendung der Sicherheitshülsen (siehe Bedienungsanleitung)